

Coussin hémostatique d'urgence 11 x 10 cm MediSafe



| | |
|----------------------|---|
| Référence | 170235 |
| Origine | Chine |
| Code douanier | 3005901000 |
| + d'info | https://www.medisafe.fr/coussin-hemostatique-medisafe.html |

Description :

- Le coussin hémostatique 11x10 cm a été conçu pour répondre efficacement aux situations d'hémorragie grâce à une compresse absorbante associée à une mousse assurant une pression ciblée. Cet équipement permet de stopper rapidement les pertes sanguines tout en maintenant une pression constante sur la plaie, réduisant ainsi le risque de complications.
- Il est livré avec des gants et une fiche de pose explicative pour garantir une utilisation sécurisée et hygiénique même par un secouriste peu expérimenté. Sa compacité le rend facile à intégrer dans toute trousse de secours ou mallette d'urgence, le rendant indispensable pour les professionnels de santé, services de secours et milieux à risque.
- Son efficacité en fait un choix sûr pour contrôler les hémorragies en attendant une prise en charge médicale.

Caractéristiques techniques :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Conditionnement de vente | Unitaire |
| Stérile | Oui |
| Largeur | 11 cm |
| Longueur | 10 cm |
| Hauteur | 3 cm |
| Couleurs | Blanc |
| Poids | 56 g |
| Usage unique | Oui |
| Public concerné | Secouristes |

Caractéristiques réglementaires :

| | |
|------------------------|------|
| T° min stockage | 15°C |
| T° max stockage | 25°C |
| Marquage CE | Oui |

Dispositif médical

Classe I

Mode d'emploi :

- Ouvrir le sachet stérile et enfiler les gants fournis
- Placer la compresse sur la plaie en maintenant une pression ferme
- Utiliser un bandage pour sécuriser le coussin et maintenir la compression
- Laisser en place jusqu'à l'arrivée des secours ou la stabilisation du blessé

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou la stérilité compromise

Changer immédiatement le coussin en cas de saturation complète